

COVID-19 ANTIGENTESTS

Vereinfachte COVID-19-Diagnose-
Schnelltests/Laientests



ProPulsan⁺
BESSER GESCHÜTZT.



HUMASIS COVID-19 AG-TEST

Vereinfachter COVID-19-Diagnostest

Effektiver Schnelltest zur frühzeitigen Erkennung einer aktiven Infektion bei symptomatischen Patienten vor Ort. Zuverlässige Ergebnisse ohne Kreuzreaktivität mit saisonalen Coronaviren.

- ✓ Für medizinisches Fachpersonal und geschulte Laien
- ✓ Geeignet zur Testung in Unternehmen, Schulen, Praxen, Apotheken etc.
- ✓ Hochwertiger, hochleistungsfähiger Test für Einzelverwendung
- ✓ Angenehmer Nasen-Abstrich im vorderen Nasenbereich (ca. 2,5 cm) möglich
- ✓ Intuitive Probenbearbeitung mit vorgefüllten Teströhrchen
- ✓ Keine Kreuzreaktivität mit häufig vorkommenden Viren und saisonalen Coronaviren
- ✓ Evaluiert vom PEI (Paul-Ehrlich-Institut)

PRODUKTDDETAILS



PRODUKT	Humasis COVID-19 Ag-Test
PZN	16904896
BfArM Test-ID	AT283/20
DIMDI Dok. Nr.	00095487
Verpackungseinheit	25 Tests pro Box – 24 Boxen pro Umkarton
Proben	Nasopharyngealer Abstrich od. einfacher Nasenmuschel-Abstrich
Lagerung	2 – 30 °C
Haltbarkeit	18 Monate



ANLEITUNG HUMASIS COVID-19 AG-TEST


Direkte Nasenabstriche für zuverlässige Ergebnisse bei Personen mit Verdacht auf COVID-19 innerhalb von sieben Tagen nach dem erstmaligen Auftreten der Symptome.

Nutzen Sie den Humasis COVID-19 Ag Test, wenn ein schneller, zuverlässiger COVID-19-Test benötigt wird. Liefert Ergebnisse in Laborqualität vor Ort in 15 Minuten.

TESTVERFAHREN




ODER

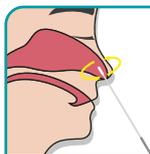

VORBEREITUNG DER PROBENNAHME

Führen Sie den Abstrichtupfer 2-2,5 Zentimeter in das linke Nasenloch ein und zirkeln Sie ihn 5x oder mindestens 15 Sek. lang in kreisenden Bewegungen fest gegen die Nasenwand. Führen Sie im Anschluss dasselbe im rechten Nasenloch durch.

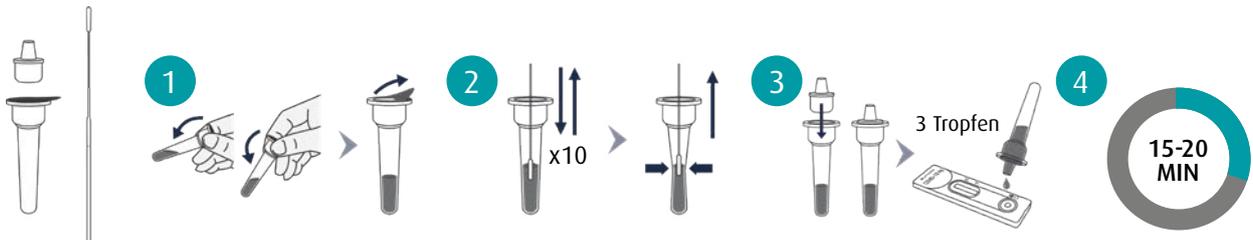

Interpretation des Ergebnisses



Negativ



Positiv



Ungültig